

Un adhésif à action instantanée

Il adhère à presque tous les matériaux dentaires avec la technique d'auto-mordançage, mordançage total ou mordançage sélectif.

Clearfil Universal Bond Quick est un adhésif universel qui agit instantanément. Il suffit d'appliquer, de sécher et de photopolymériser. Il n'y a pas de temps d'attente, ni d'applications multiples ou de brossage vigoureux. Grâce à la *Rapid Bond Technology* exclusive de Kuraray Noritake, il garantit une adhésion durable en une procédure simple. Il adhère à pratiquement tous les matériaux dentaires, avec la technique de mordançage de son choix : auto-mordançage, mordançage total ou mordançage sélectif.

C'est à la fois un *primer*, un adhésif, un silane pour une adhésion et un prétraitement simple et rapide. Quelles que soient les indications et la surface de restauration, il offre une adhésion fiable pour les restaurations directes et indirectes, les reconstitutions corono-radiculaires et même pour les réparations intra-buccales et extra-buccales. Il est compatible avec presque tous les matériaux composites, même dual-cure, comme par exemple pour les collages de tenons ou les reconstitutions corono-radiculaires. Il peut être utilisé en prétraitement pour les métaux, zircons, composites, porcelaines et vitrocéramiques.

RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES

Il a une faible épaisseur de film ne dépassant pas 5 à 10 µm. La nouvelle combinaison de monomères crée de très nombreuses liaisons réticulaires qui optimisent la stabilité de la fine

couche d'adhésif. Cette combinaison produit une couche adhésive de qualité supérieure et résistante à l'humidité qui élimine le risque de décoloration au bord de la dent. C'est pourquoi il est indiqué pour toutes les restaurations esthétiques.

Contrairement aux autres adhésifs universels en une étape qui utilisent des « monomères lents », dont la pénétration dans la dentine est lente, le praticien peut poursuivre le travail sans attendre. La *Rapid Bond Technology* associe le monomère MDP original à de nouveaux monomères hydrophiles, dont l'interaction garantit une stabilité et une résistance à l'humidité optimales, pour un résultat durable.

Le MDP réalise une liaison chimique solide avec l'hydroxyapatite. Utilisé avec succès depuis plus de 35 ans, le MDP a fait la preuve de ses excellentes propriétés d'adhésion. Le nouveau monomère hydrophile offre une très bonne pénétration grâce à sa forte capacité hydrophile. Après polymérisation, il présente une stabilité et hydrophobie optimales grâce à son réseau de polymères hautement réticulés. ☺

C'est à la fois
un primer,
un adhésif,
un silane.

Le témoignage du docteur Didier Laderriere (85)

IL EST EFFICACE

J'utilise ce produit depuis un mois et demi. Je l'ai choisi sur les conseils éclairés d'un study group. Il possède une très bonne ergonomie et son protocole est simple. Il est efficace et simplifie le travail auprès du patient. Les recherches du laboratoire offrent un beau résultat



Le témoignage du docteur Fabrice Gambier (83)

L'IMPRÉGNATION DENTINAIRE EST AMÉLIORÉE

J'utilise ce produit depuis peu, après avoir terminé mon dernier Clearfil SE 3 Bond Plus dont j'étais déjà très satisfait. Je suis un fervent utilisateur de Kuraray depuis des années. Cet adhésif possède les qualités d'adhésion d'un adhésif universel. Son protocole d'utilisation est simple. L'imprégnation dentinaire est améliorée. Enfin, le conditionnement en unidoses est pratique et la durée de péremption longue.



Kuraray Noritake

Tél. : 01 56 45 12 51

@ : dental-fr@kuraray.com

3w : kuraray-dental.eu/fr

Le témoignage du docteur Jon Gurrea

IL EST TRÈS SIMPLE D'UTILISATION

Le fabricant, qui révolutionne l'adhésion avec le 10-MDP monomère

et sa technologie d'auto-mordançage, lance un nouveau système d'adhésif universel. En plus d'avoir prouvé son efficacité d'après les études, il est très simple d'utilisation, rapide et compatible avec les produits Dual-cure de Kuraray. Dans ce cas, ce système d'adhésion ne nécessite pas de Dual Activator et, de plus, il libère du fluor. Une véritable avancée dans les adhésifs universels.



CLEARFIL
Universal Bond Quick
BOND 5 ml
Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama, Japan